

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DAWKOMIERZY PIERŚCIONKOWYCH PI-01

1. W celu zapewnienia ciągłości pomiarów, każdej monitorowanej osobie przydzielono dwa dawkomierze pierścionkowe PI-01 o różnych numerach.
2. Każda przesyłka zawierać będzie dawkomierze pierścionkowe wraz ze „Świadectwem przydatności dawkomierzy”.
3. Dawkomierze pierścionkowe należy rozdzielić między pracowników zgodnie z wykazem znajdującym się w „Świadectwie przydatności dawkomierzy”.
4. Pod koniec okresu monitorowania nadejdzie nowa przesyłka z dawkomierzami pierścionkowymi, przeznaczonymi do noszenia w następnym okresie pomiarowym. Po jej otrzymaniu należy noszone pierścionki wymienić na nowe.
5. Zebrane dawkomierze pierścionkowe wraz z wykazem, na którym należy zaznaczyć wszelkie zmiany w przydzieleniu dawkomierzy (np. zmiana osoby kontrolowanej czy rezygnacja z kontroli wraz z datą, od kiedy dana zmiana obowiązuje) prosimy niezwłocznie odesłać do IFJ do odczytu.
6. Dawkomierze pierścionkowe należy chronić przed wysoką temperaturą lub uszkodzeniem mechanicznym. Należy je zakładać pod rękawice ochronne. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dawkomierza należy niezwłocznie powiadomić Biuro Obsługi Klienta Laboratorium w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, celem wymiany. Nie należy pisać na dawkomierzach pierścionkowych.
7. Imienny wykaz zmierzonych dawek w formie „Sprawozdania z badań” przekazany zostanie do Państwa, nie później niż z dawkomierzami przygotowanymi na kolejny okres pomiarowy.
8. Dawkomierze pierścionkowe PI-01 można myć i sterylizować ogólnie stosowanymi środkami chemicznymi. Nie można sterylizować dozymetrów metodą temperaturową.
9. Dawkomierze pierścionkowe należy poddać dezynfekcji przed odesłaniem do odczytu.

Dodatkowe informacje na temat użytkowania dawkomierzy, dozymetrii termoluminescencyjnej oraz kwestii formalnych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dziale FAQ. Zapraszamy na:

<https://ladis.ifj.edu.pl>

Data utworzenia 20.03.2020